

# osom<sup>®</sup>

## RSV/Adeno Test



## FÖR UPPTÄCKT AV RSV- OCH/ELLER ADENOVIRUSANTIGENER

## FUNKTIONER:

- ✓ **NOGGRANT**; > 90 % jämfört med PCR för RSV; 85 % jämfört med PCR för adenovirus
- ✓ **SNABBT**; Mindre än 1 minuts behandlingstid; resultat på högst 10 minuter
- ✓ **PROV**; bomullspinne från näsan, nässugning eller bomullspinne från halsen
- ✓ **DIFFERENTIELL DIAGNOS**
- ✓ **UTBILDNING**; Utbildning och certifiering online; [www.osomtraining.com](http://www.osomtraining.com)
- ✓ **KUNDVÅRD**; Teknisk support bemannad med certifierade medicintekniker



## TESTPROCEDUR / -RESULTAT

Tillsätt extraktionsbuffert i provröret.

Sätt i bomullspinnen i röret och blanda kraftigt.

Tryck ut vätska genom att klämma på rörets sida.

Sätt i teststickan i provröret.

Avläs resultatet efter 10 MINUTER.

**RSV-POSITIV**

**ADENOVIRUS-POSITIV**

**NEGATIVT**

## BESKRIVNING

OSOM<sup>®</sup> RSV/ADENO TEST  
OSOM<sup>®</sup> RSV/ADENO CONTROL KIT

## KONFIGURATION

25 TESTER

## KATALOGNR.

197E (CE MARKED)  
198E (CE MARKED)

## FÖRVARING

RUMSTEMPERATUR  
RUMSTEMPERATUR

ENDAST FÖR EXPORT. SÄLJS INTE I U.S.A.

# SEKISUI

## INTERNATIONAL

Sekisui Diagnostics (UK) Limited  
50 Gibson Drive  
Kings Hill, West Malling, Kent, ME19 4AF, UK  
Phone: +44 (0) 1732 220022  
Fax: +44 (0) 1732 220024  
Email: [info@sekisui-dx.com](mailto:info@sekisui-dx.com)  
ISO 9001 Certified, ISO 13485 Certified

OSOM<sup>®</sup> is a registered U.S. trademark of Sekisui Diagnostics, LLC.  
©2013 Sekisui Diagnostics, LLC – All rights reserved.



MADE IN THE USA

1464-0, 10/13