

osom[®]

Trichomonas Rapid Test

HJÄLPER TILL ATT BRYTA NED BARRIÄRER FÖR STI-TESTNING OCH -BEHANDLING
(FÖR ANVÄNDNING MED PROVPINNAR INSAMLADE FRÅN PATIENTS VAGINA)



FÖR UPPTÄCKT AV TRICHOMONAS VAGINALIS- ANTIGENER




FUNKTIONER:

- ✓ **NOGGRANT;** 83 % sensitivitet jämfört med odling; 95 % överensstämmelse med kombinerade odling och utstryksprov
- ✓ **SNABBT;** Resultat på högst 10 minuter
- ✓ **FLEXIBELT;** Innehåller patientanvisningar som gör egen insamling av prov möjlig
- ✓ **OBJEKTIVT;** Upptäcker antigenen, undanröjer osäkerhet förknippad med instabilitet hos levande organismer
- ✓ **UTBILDNING;** Utbildning och certifiering online; www.osomtraining.com
- ✓ **KUNDVÅRD;** Teknisk support bemannad med certifierade medicintekniker



TESTPROCEDUR / -RESULTAT

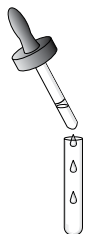

Tillsätt provbuffert i provröret.

Sätt i en bomullspinne och blanda.



Låt stå i 1 MINUT.




Ta ut pinnen ur provröret.

Sätt i teststickan i det extraherade provet.



Avläs resultatet efter 10 MINUTER.

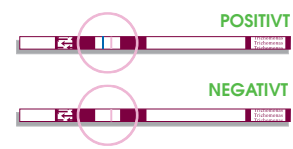

BESKRIVNING

OSOM[®] TRICHOMONAS RAPID TEST
TRICHOMONAS POSITIVE CONTROL KIT

KONFIGURATION

25 TESTER

KATALOGNR.

181E (CE MARKED)
182 (CE MARKED)

FÖRVARING

RUMSTEMPERATUR
RUMSTEMPERATUR

SEKISUI

INTERNATIONAL

Sekisui Diagnostics (UK) Limited
50 Gibson Drive
Kings Hill, West Malling, Kent, ME19 4AF, UK
Phone: +44 (0) 1732 220022
Fax: +44 (0) 1732 220024
Email: info@sekisui-dx.com
ISO 9001 Certified, ISO 13485 Certified

OSOM[®], and the QC inside logo are registered U.S. trademarks of Sekisui Diagnostics, LLC.
©2013 Sekisui Diagnostics, LLC – All rights reserved.



1468-0, 10/13