


osom

Mono Test

Sensitivitet: 99%
Specificitet: 96%
Antal Test: 25
Varenummer: 11145
FDA godkändt



Tilsats av prov:

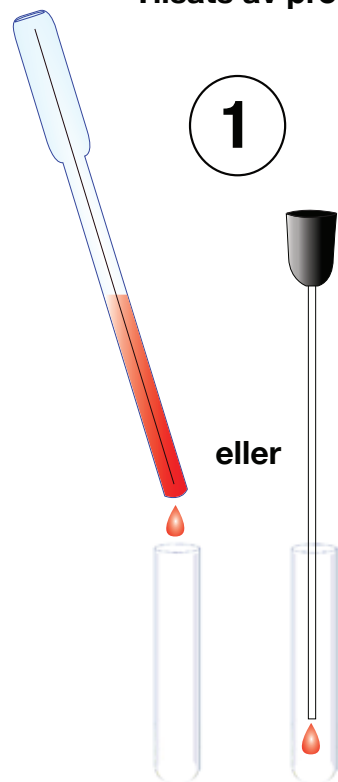

1

1 Droppe

För serum, plasma,
helblodprov i rör,
eller för fingertoppsblod.

Tilsats av spädningsmeddel:



2

1 Droppe

Tilsätt långsamt 1
droppe spädnings-
meddel.

Avläs resultatet:



3

5 minuter

Avläs resultatet
efter 5 minuter.

Tolkning av testresultat:



4

Positivt +

En blå
kontrolllinje OCH en
röd testlinje.

Negativt -

En blå
kontrolllinje
men ingen röd
testlinje.

MG MediGroup

Tel.: +45 45765425
Fax: +45 45765425
info@medigroup.dk